

# Attends® Pull-Ons



## Anlegehinweise Attends Pull-Ons

- 1**  **Vorbereitung**

Messen Sie jeweils den Hüft- und den Taillenumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.
- 2**  **Verwendung**

Ziehen Sie die Attends Pull-Ons Einmalhosen wie normale Unterwäsche an und aus.
- 3**  **Passform**

Aufgrund der flexiblen Passform passt sie sich ähnlich wie normale Unterwäsche dem Körper an. Hautfreundlich dank atmungsaktiver Materialien.
- 4**  **Nach Gebrauch**

Die Pull-Ons kann zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden.

## Hinweise und Tipps

### Produktauswahl

- Wählen Sie die Größe der Pull-Ons aufgrund des Hüft- bzw. Taillenumfangs. Nehmen Sie den größeren von beiden Werten.
- Wählen Sie die Saugstärke je nach Ausprägung der Blasenschwäche: Saugstärke 3 ist geeignet bei leichter, 5 bei mittlerer Inkontinenz, 8 für sehr große Harnverluste und komplette Blasenentleerungen. Die farbigen Streifen am Bund müssen bei den Größen S, M, L und XL immer hinten sein.
- Pull-Ons Einmalhosen sind auch geeignet für Personen, die Einlagen ablehnen.

### Anlegen

- Ziehen Sie das Produkt so an, dass die Farbstreifen am Bund hinten sind (bei den Größen S, M, L und XL).

### Produktwechsel

- Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. Wenn mehr als die Hälfte verschwommen ist, sollten Sie das Produkt wechseln. Falls nicht, kann das Produkt weiter verwendet werden.

### Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.