

Attends® Pull-Ons



Anleheinweise Attends Pull-Ons

- 1** 

Vorbereitung

Messen Sie jeweils den Hüft- und den Taillenumfang. Nehmen Sie den höheren Wert und wählen Sie danach die Produktgröße aus.
- 2** 

Verwendung

Ziehen Sie die Attends Pull-Ons Einmalhosen wie normale Unterwäsche an und aus.
- 3** 

Passform

Aufgrund der flexiblen Passform passt sie sich ähnlich wie normale Unterwäsche dem Körper an. Hautfreundlich dank atmungsaktiver Materialien.
- 4** 

Nach Gebrauch

Die Pull-Ons kann zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die Größe der Pull-Ons aufgrund des Hüft- bzw. Taillenumfangs. Nehmen Sie den größeren von beiden Werten.
- Wählen Sie die Saugstärke je nach Ausprägung der Blasenschwäche: Saugstärke 3 ist geeignet bei leichter, 5 bei mittlerer Inkontinenz, 8 für sehr große Harnverluste und komplette Blasenentleerungen. Die farbigen Streifen am Bund müssen bei den Größen S, M, L und XL immer hinten sein.
- Pull-Ons Einmalhosen sind auch geeignet für Personen, die Einlagen ablehnen.

Anlegen

- Ziehen Sie das Produkt so an, dass die Farbstreifen am Bund hinten sind (bei den Größen S, M, L und XL).

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.



Die Hautfreundlichkeit von Attends Pull-Ons von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.