


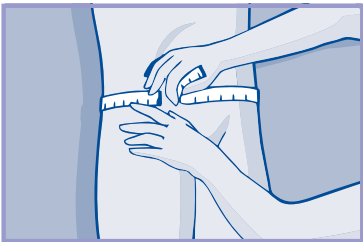


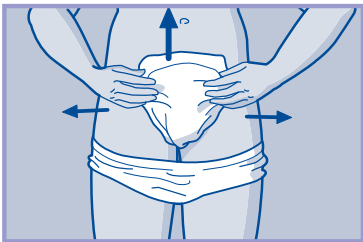
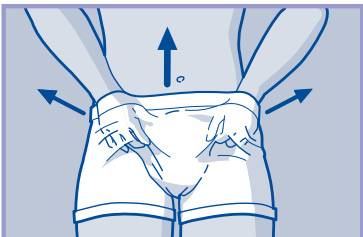
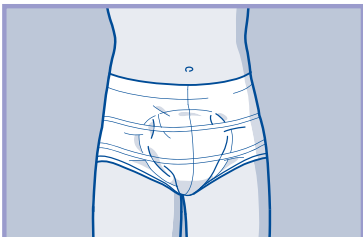


Anleheinweise Attends Contours Air Comfort 4-10 mit Fixierhose

Vorbereitung

- 1**  Attends Stretch Pants Fixierhosen sollen in Kombination mit Attends Einlagen Contours Air Comfort 4-10 benutzt werden. Die richtige Größe der Stretch Pants ist wichtig. Messen Sie den Hüft- und Taillenumfang und benutzen Sie den größeren der beiden Messwerte, um zu gewährleisten, dass die richtige Größe gewählt wurde.
- 2**  Ziehen Sie die Fixierhose bis zur Mitte der Oberschenkel hoch.
-  Falten Sie die Attends Contours Air Comfort auseinander und formen Sie die Einlage wannen-förmig der Länge nach.
- Die großen seitlichen Auslaufbarrieren stellen sich dann automatisch auf.

Anlegen

- 3**  Legen Sie die Einlage von vorne nach hinten ein, so dass die kleinere Fläche vorne und die größere Fläche am Gesäß ist.
- 4**  Streichen Sie die Einlage glatt an den Körper, damit keine Falten entstehen. Achten Sie darauf, dass der blaue Streifen in der Mitte des Produktes (Nässeindikator) in Verlängerung der Wirbelsäule verläuft.
- 5**  Ziehen Sie die Fixierhose nach oben und achten Sie darauf, dass die wasserfeste Rückseite der Einlage nicht nach innen eingeschlagen ist.
- 6**  Die Einlage muss besonders zwischen den Beinen fest anliegen und vollständig von der Fixierhose bedeckt sein.

Hinweise und Tipps

Produktauswahl

- Wählen Sie die Saugstärke aufgrund Ihrer individuellen Ausprägung.
- Wählen Sie die Fixierhosen entsprechend Ihres Hüft-/Taillenumfangs aus.
- Je kleiner die Einlage ist, desto unauffälliger und diskreter ist sie zu tragen.

Anlegen

- Stellen Sie sicher, dass die Einlage komplett ausgebreitet ist bevor Sie sie einlegen.
- Die Einlage darf nicht aufgeschüttelt werden.
- Platzieren Sie das schmalere Ende der Einlage vorne und die größere Fläche am Gesäß.
- Formen Sie die Einlagen schiffchenförmig der Länge nach.
- Seitenbündchen nicht anfassen - sie stellen sich auf und passen sich der Form der Einlage an.
- Platzieren Sie die Einlage bei Männern weiter vorne und bei Frauen mittig.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Größe der Fixierhose gewählt ist.
- Auch wenn die Einlage in liegender Position angebracht wird, legen Sie sie bitte wie im Stehen an.

Produktwechsel

- Der Nässeindikator (blauer Streifen auf der Produktrückseite) zeigt an, wie stark das Produkt ausgelastet ist. Der Streifen beginnt zu verschwimmen. Wenn mehr als die Hälfte verschwommen ist, sollten Sie das Produkt wechseln.
- Saubere und trockene Einlagen können nach dem Toilettengang nochmals verwendet werden.
- Entfernen Sie ausgelastete Einlagen vom Gesäß her.
- Reinigen Sie die Haut nach ihren Richtlinien - immer von vorne nach hinten.
- Verwenden Sie keine Creme auf Öl-Basis und kein Puder. Diese Produkte könnten die Saugfähigkeit der Attends Contours beeinflussen.

Auslaufschutz

- Überprüfen Sie, ob das Produkt richtig sitzt und ausreichend saugfähig ist.
- Überprüfen Sie ebenfalls, ob die Fixierhose die richtige Größe hat.
- Falls das Produkt ausläuft, sollten Sie erst dann zur nächst höheren Saugstärke wechseln, wenn Sie ausgeschlossen haben, dass es sich um einen Anlegefehler handelt.

Entsorgung

- Entsorgen Sie das Produkt über den Restmüll.
- Werfen Sie das Produkt nicht in die Toilette.
- Attends Stretch Pants Fixierhosen sind 25 mal bei 40° bis 60° waschbar und damit wiederverwendbar.

Attends® Contours Air Comfort



Die Hautfreundlichkeit von Attends Contours ist von proDERM, Institut für Angewandte Dermatologische Forschung, bestätigt worden.